

Out & About

SITZSTOCK-PRODUKTPALETTE

Im Handumdrehen vom Spazierstock zum erholsamen Sitzstock!

Vielen Dank dafür, dass Sie einen neuen Linden Out & About- Sitz gewählt haben und wir wünschen Ihnen einen hilfreichen Begleiter für viele Jahre. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte alle Anweisungen:

- Out & About – Gehhöhe: 925 mm
Sitzhöhe: 410 mm
- Out & About – Gehhöhe: 960 mm
Sport Sitzhöhe: 440 mm
- Max. Benutzergewicht: 125 kg

Ihr Out & About Sitz ist komplett mit vier Gummifüßen ausgestattet und wurde vorzugsweise für den Einsatz auf ebenen, nicht rutschigen Oberflächen entwickelt.

ACHTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig, ob, die Gummifüße in gutem Zustand sind. Benutzen Sie den Sitz niemals, wenn ein Gummifuß fehlt.



1. Benutzung als Sitz: Öffnen Sie ihn vollständig. Stellen Sie sicher, dass alle Füße Kontakt mit dem Untergrund haben.
2. Setzen Sie sich langsam hin. Zur maximalen Stabilität ist es wichtig, dass beim Sitzen beide Füße vor Ihnen fest auf dem Boden platziert sind.
3. Der Out & About - Stock ist für den Gebrauch als Sitz für eine Person bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht für andere Zwecke.



SPORT- MODELLE

Die Sport - Modelle mit zusätzlicher Spitze und Scheibe können auf weichem Untergrund benutzt werden, indem man alle Gummifüße entfernt. Für Benutzung auf hartem Untergrund setzen Sie die Gummifüße wieder auf.



VERFÜGBARE
MODELLE:

Polierter
Aluminium-
Rahmen und
farbige
Sitzfläche
oder

Deluxe:
Farbiger
Rahmen
passend zur
Sitzfläche –

VERFÜGBARE
FARBEN:

Schwarz, Grün
oder Weinrot

