

Out & About

ZIT-/WANDELSTOKKEN

Verandert in een oogwenk van wandelstok in een zitje!

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Linden Out & About zitje. Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. Lees alle aanwijzingen goed door zodat u het zitje veilig kunt gebruiken:

- **Out & About – Hoogte van de handgreep opgeklapt: 925 mm**
Zithoogte: 410 mm
- **Out & About – Hoogte van de handgreep opgeklapt: 960 mm**
Sport Zithoogte: 440 mm
- **Max. gewicht gebruiker: 125 kg**

Uw Out & About zitje is voorzien van 4 rubber doppen en is bedoeld voor gebruik op een vlakke, niet gladde ondergrond.

N.B. Controleer regelmatig of de rubber doppen nog in goede staat verkeren. Gebruik de Out & About NOOIT wanneer een of meer doppen defect zijn of ontbreken.



1. Gebruik als zitje: klap de Out & About geheel uit en zorg ervoor dat alle vier de pootjes op de grond steunen.
2. Ga langzaam zitten. Voor optimale stabiliteit is het belangrijk dat u beide benen voor u hebt met beide voeten stevig op de grond.
3. Het Out & About zitje is bedoeld voor gebruik door 1 persoon. Gebruik het niet voor andere doeleinden.



OUT & ABOUT SPORT

De Sportuitvoeringen met extra punt en plaat kunnen worden gebruikt op een zachte ondergrond nadat de rubber doppen zijn verwijderd. Breng de rubber doppen weer aan voordat u de Out & About weer op een harde ondergrond gaat gebruiken.



BESCHIKBARE MODELLEN
Gepolijste aluminium uitvoering met canvas zitting in kleur of 'Deluxe' met gecoat frame in de kleur van de zitting –

BESCHIKBARE KLEUREN
Zwart, groen of wijnrood

