

Quattro

-ISTUINMALLIT

Kävelykepestä kätevästi istuimeksi hetkessä!

Kiitos, että valitsit Linden Quattro -istuimen. Toivotamme monia tyytyväisiä käyttövuosia. Turvallisuuden varmistamiseksi lue kaikki ohjeet:

- Quattro 32 – kävelykepin korkeus: 815 mm
Istuimen korkeus: 480 mm
- Quattro 34 – kävelykepin korkeus: 865 mm
Istuimen korkeus: 525 mm
- Quattro 37 – kävelykepin korkeus: 940 mm
Istuimen korkeus: 590 mm
- Käyttäjän enimmäispaino: 125 kg.

Quattro-istuimessa on neljä kumijalkaa ja se on suunniteltu käytettäväksi tasaisilla, pitävillä pinnoilla.

HUOMIO: Tarkista säännöllisesti, että kaikki kumijalat ovat hyvässä kunnossa. Turvallisuussyistä ÄLÄ käytä istuinta, jos jokin jaloista puuttuu.

1. Käyttö istuimena: Avaa täysin ja varmista, että kaikki jalat koskettavat maata.
2. Istu alas hitaasti. Parhaan tasapainon saavuttamiseksi on tärkeää, että istut reidet eteenpäin ja molemmat jalat tukevasti maassa.
3. Quattro-istuin on tarkoitettu vain yhden henkilön istuimeksi. Älä käytä sitä mihinkään muuhun.



SPORT-ISTUINMALLIT

Sport-istuinmalleja, joissa on lisänä kärki ja levy -jalat, voidaan käyttää pehmeällä maalla irrottamalla kaikki kumijalat. Laita kumijalat takaisin kovalla pinnalla käytettäessä.



SAATAVILLA
OLEVAT MALLIT
Kiillotettu
alumiinirunko
ja värillinen
kangas
tai
Deluxe, jossa
istuimen
väriseksi
maalattu
runko

SAATAVILLA
OLEVAT VÄRIT:
Musta tai vihreä