

Quattro

STOLE SORTIMENT

Fra spadserestok til siddestok på bare et øjeblik!

Tak fordi du valgte en Linden Quattro stol. Vi ønsker dig glæde med den i mange år frem i tiden. For sikker brug bedes du læse alle instruktionerne:

- Quattro 32 – Gåhøjde: 815 mm
Sædehøjde: 480 mm
- Quattro 34 – Gåhøjde: 865 mm
Sædehøjde: 525 mm
- Quattro 37 – Gåhøjde: 940 mm
Sædehøjde: 590 mm
- Maksimal brugervægt: 125 kg.

Din Quattro stol er udstyret med fire gummi dupsko og er blevet designet til brug på jævne, ikke-glatte overflader.

HUSK: Jævnligt at tjekke at alle gummi dupsko er i god stand. For din egen sikkerheds skyld bør du **ALDRIG** bruge stolen uden dupsko.

1. Til brug som stol: Den åbnes helt og du tjekker at alle fødder er kontakt med jorden.
2. Sæt dig langsomt på sædet. For maksimal stabilitet er det vigtigt at have benene foran dig når du sidder og at begge fødder er placeret stabilt på underlaget.
3. Din Quattro stol er udviklet til brug af kun én person. Bør ikke anvendes til andre formål.



SPORT STOLE MODELLER

Sport stole modellerne med ekstra spidser og pladefødder kan anvendes på blødt underlag ved at fjerne alle gummi dupsko. Fjern alle dupsko når stolen bruges på hårdt underlag.



TILGÆNGELIGE
MODELLER
Poleret
aluminiums
ramme og
farvet lærred
eller
"Deluxe"
malet ramme
som matcher
sædefarven

TILGÆNGELIGE
FARVER:
Sort eller grøn