

## Im Handumdrehen vom Spazierstock zum erholsamen Sitzstock!

Vielen Dank dafür, dass Sie einen neuen Linden Quattro- Sitz gewählt haben und wir wünschen Ihnen einen hilfreichen Begleiter für viele Jahre. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte alle Anweisungen:

- Quattro 32 – Gehhöhe: 815 mm  
Sitzhöhe: 480 mm
- Quattro 34 – Gehhöhe: 865 mm  
Sitzhöhe: 525 mm
- Quattro 37 – Gehhöhe: 940 mm  
Sitzhöhe: 590 mm
- Max. Benutzergewicht: 125 kg

Ihr Quattro- Sitz ist komplett mit vier Gummifüßen ausgestattet und wurde vorzugsweise für den Einsatz auf ebenen, nicht rutschigen Oberflächen entwickelt.

**ACHTUNG:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob, die Gummifüße in gutem Zustand sind. Benutzen Sie den Sitz niemals, wenn ein Gummifuß fehlt.



1. Benutzung als Sitz: Öffnen Sie ihn vollständig. Stellen Sie sicher, dass alle drei Füße Kontakt mit dem Untergrund haben.
2. Setzen Sie sich langsam hin. Zur maximalen Stabilität ist es wichtig, dass beim Sitzen beide Füße vor Ihnen fest auf dem Boden platziert sind.
3. Der Quattro- Stock ist für den Gebrauch als Sitz für eine Person bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht für andere Zwecke.



## SPORT- MODELLE

Die Sport - Modelle mit zusätzlicher Spitze und Scheibe können auf weichem Untergrund benutzt werden, indem man alle Gummifüße entfernt. Für Benutzung auf hartem Untergrund setzen Sie die Gummifüße wieder auf.



VERFÜGBARE  
MODELLE:

Polierter  
Aluminium-  
Rahmen und  
farbige  
Sitzfläche

oder

Deluxe:  
Farbiger  
Rahmen  
passend zur  
Sitzfläche –

VERFÜGBARE  
FARBEN:

Schwarz oder  
Grün