

Supaseat LÍNEA

¡De bastón a cómoda silla en un instante!

Gracias por elegir el modelo Supaseat de Linden. Le deseamos muchos años de uso satisfactorio. Para su completa seguridad, lea todas las instrucciones:

- Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway & Gripseat

Altura andando de: 850 mm a 1030 mm

Altura sentado de: 650 mm a 830 mm

- Peso máximo del usuario: 125 kg.

Su modelo Supaseat está pensado únicamente para uso individual.
No usar para ninguna otra actividad.

PRECAUCIÓN: Los bastones sillas de un solo tubo están pensados para aquellas personas que pueden balancearse con seguridad y formar un “trípode” estable al compartir su peso entre el asiento y sus pies. Si usted tiene una minusvalía o alguna condición que pueda afectar a su equilibrio, pida consejo médico antes de usar el producto.

1. La altura se ajusta presionando los botones de resorte y desplazando la pata hasta la altura deseada. Asegúrese de que ambos botones estén bloqueados en su sitio antes del uso.
2. Sentarse en la silla: Sitúe el asiento a su espalda con la base a unos 45° aproximadamente. Acerque el asiento hacia usted y siéntese lentamente con sus pies separados unos 45°.



FOLDAWAY (mire la foto inferior) Primero saque la punta y la roseta de la bolsa. Después saque el asiento con las conteras de goma, asegurándose de sostener tanto el asiento como los tubos. Encaje los tubos entre sí cuidadosamente.



GRIPSEAT

El modelo Gripseat, con su punta magnética, es ideal para recoger los cartuchos de escopeta usados.

MODELOS
DISPONIBLES

Observer
(con contera
de goma)

Explorer
(punta y roseta
solo para suelos
blandos)

Foldaway
(contera de goma,
punta y roseta)

Gripseat
(puntera y roseta
solo para suelos
blandos, punta
magnética)

COLORES
DISPONIBLES:
Negro, marrón
o verde.